

最大电容量

这些产品的最大电容量：

- 4000 V_p

安全注意事项

警告！

本产品必须由受过培训、知道如何按照使用说明书进行操作的医务人员来使用。

在每次使用之前，检查所有连接电缆的绝缘情况，并查看有无机械性损伤的迹象。

如果发现有任何损坏，请不要使用该产品！

使用时不得有易燃易爆物质存在！

切勿把器械放在患者身上或其旁边。

避免产品受到任何形式的机械损伤！不得抛掷！不得用力！

如果产品组件或部件变弯，请切勿将其矫直！刮铲可弯折。

ERBE 明确警告不得对其产品进行改动，否则，ERBE 将不承担任何责任。

使用注意事项

请仅使用清洁、消毒和灭菌的产品。

在产品第一次使用之前，以及随后的每次使用之前，都要事先对产品进行清洁和消毒。

检查产品

在每次使用之前，检查所有连接电缆的绝缘情况，并查看有无机械性损伤的迹象。

如果发现有任何损坏，请不要使用该产品！

产品安装

请将高频电极 / 延长手柄插入手柄止挡处固定。

清洗、消毒、杀菌

安全注意事项

ERBE 推荐采用机器清洁 / 消毒。由于手工清洁的效果明显不佳，在此我们不做推荐。

清洗时不要使用尖锐的物体。

使用后务必将消毒剂彻底清洗干净！

产品在进行清洗 / 消毒时可达到的最高温度是 95 ℃。

务必注意按照清洁剂和消毒剂制造商的使用说明进行操作。

灭菌的最高温度可达到 134 ℃。

不得在热空气中进行灭菌！

重复使用限制

频繁进行清洁消毒处理会对本产品造成不良影响，故请留意产品检查的安全须知。如果产品出现明显损伤或功能下降，请切勿再使用。

推荐使用的设备 / 物质

如果根据制造商的使用说明使用了所推荐的或相当的物质，那么对产品的使用寿命、清洗和杀菌按下列清洗和准备程序有效。

- 机器清洁/消毒器消毒采用 G 7836 CD (Miele & Cie. KG, Guetersloh/Germany)，清洁液采用 neodisher® forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg/Germany) 按照推荐清洁程序。

建议流程

ERBE 公司推荐下述的处理流程。除非明确排除，否则也允许与之等值但稍有偏差的流程。用户有责任通过适当的措施（例如可靠性验证，例行监测及材料适应性的检查等）确保实际使用的流程合格与否。

拆除

1. 将高频电极 / 延长手柄从手柄中取出。

预清洗

预清洁时请使用水，必要时使用非固着消毒剂。

- 请在流水下冲洗本产品。
- 请用软毛刷 / 软布清除表面污垢。

机器清洗和消毒

清洗与消毒仪器原则上必须具备经检验的有效性（例如符合 DIN EN ISO 15883 标准的相应 CE 标志）。

清洁剂和消毒剂必须适用于塑料和金属材质的医疗产品，其 pH 值须介于 5.5 至 11 之间。

务必注意按照清洁剂和消毒剂制造商的使用说明进行操作。

- 小心地将本品放入到一个相应的冲洗篮子中。在此请注意，不要使本品接触到其它仪器 / 仪器部件。
- 启动一个经过检验的具有下列特点的程序：
 - 热消毒（5 至 10 分钟，温度 90 至 93 ℃）。
 - 最后用蒸馏水或去离子水进行冲洗。
 - 留出充足的时间使产品干燥。

检查

- 检查产品有无肉眼可见的损伤和磨损：
 - 产品上的损伤，比如，裂纹，表面粗糙，劈裂，变色等。
 - 产品绝缘和或电缆 / 接头绝缘的损伤，如断裂和破碎。
 - 外壳的损伤。
 - 产品或产品部件弯曲。不要试图把弯曲的仪器弄直！

如果发现有任何损坏，请不要使用该产品！

包装

1. 产品的包装采用纸制 / 聚乙烯制一次性的灭菌包装（单包装或双包装）和或灭菌容器。

杀菌

产品在杀菌前必须先经过清洗和消毒。

ERBE 建议采用如下所属的蒸汽灭菌法，如采用其他灭菌方法导致的损坏，ERBE 不承担任何责任。

蒸汽消毒

- 能完全干燥产品的分馏真空流程
- 在 132 – 134 ℃ 条件下保持 3 – 18 分钟
- 灭菌器按照现行国家标准和规定（例如 DIN EN 13060 或 DIN EN 285 标准）
- 按 DIN EN ISO 17665 标准验证灭菌流程的可靠性

关于杀菌过程中的装载、操作和干燥时间等，请遵照灭菌仪器制造商给出的建议说明书。