



erbe
power your performance.




Монополярный аппликатор

с комбинированными функциями
водоструйной и вч-хирургии экономит
время при операции

Вода в сочетании с током. Зажигательная идея.



Диссекция тканей паренхимы в хирургии печени.

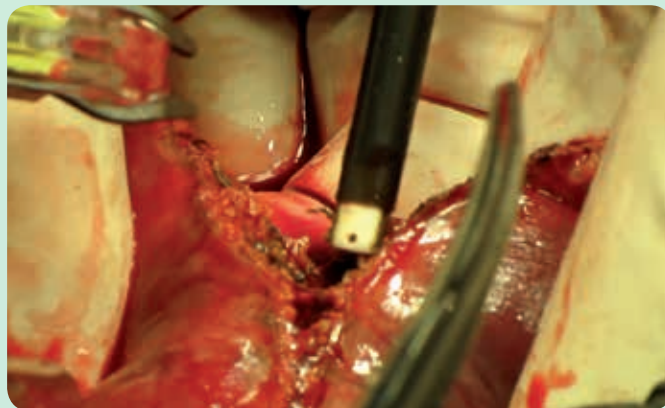

*Благодаря постоянному наличию ВЧ-коагуляции можно немедленно останавливать небольшие кровотечения
(источник фотографий: проф. Х.-Г. Рау, клиника Дассау).*

В монополярном аппликаторе обе функции под рукой у хирурга.

В зависимости от индивидуального стиля работы хирург может активировать обе функции попеременно либо использовать ВЧ-функцию одновременно с водоструйной.



20150-036




Благодаря особому расположению коагуляционных электродов на керамическом наконечнике аппликатора можно точно направлять коагуляцию. Это помогает в значительной степени избежать термических повреждений прилегающих структур.

Более быстрая диссекция в хирургии печени

Водоструйная функция позволяет селективно рассекать кровеносные сосуды и желчные протоки. После препапарирования кровеносные сосуды коагулируются ВЧ-током. Благодаря двойной функции не требуется смена инструмента. Процесс диссекции ускоряется и кровотечения, и так незначительные ввиду особенностей методики, становятся ещё меньше, коагуляция равномернее, с уменьшенным некрозом. За счёт этого монополярный аппликатор минимизирует потребность гемотрансфузии. Для пациента это ещё один аргумент в пользу безопасности вмешательства.

В течение всей операции хирург имеет хороший обзор операционного поля, в т.ч. благодаря наличию встроенного в аппликатор отсоса. Хороший обзор означает в то же время повышение безопасности вмешательства.

Другие области применения: урология, например, нефрэктомия и общая хирургия.

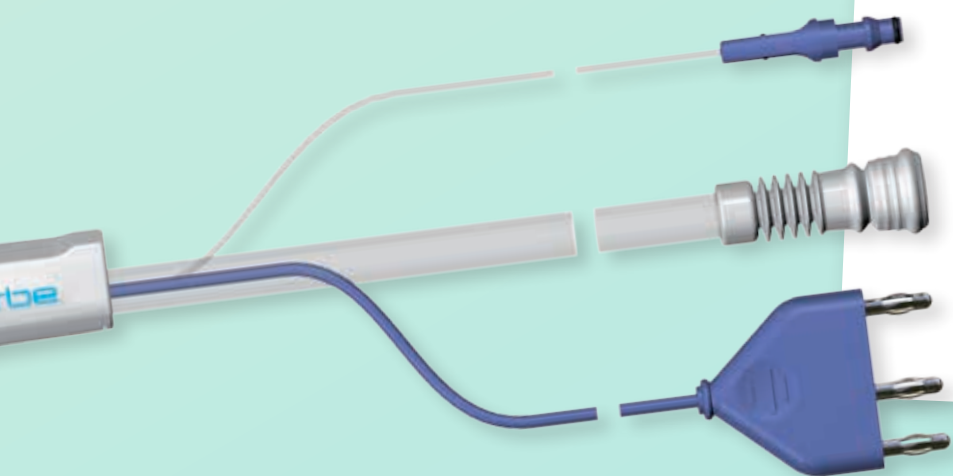

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ МОНОПОЛЯРНОГО АППЛИКАТОРА:

- ✔ Комбинирование водоструйной и высокочастотной хирургии
- ✔ Ускоренная диссекция, сокращение времени операции, требуется меньше зажимов
- ✔ Уменьшение кровотечений, снижение потребности гемотрансфузии
- ✔ Хороший обзор операционного поля, в т.ч. благодаря наличию встроенного в аппликатор отсоса
- ✔ Пониженное латеральное тепловыделение сберегает прилегающие ткани



Активация ВЧ осуществляется с помощью синей кнопки коагуляции. Рекомендуем выбирать в системе VIO режимы **SWIFT COAG** и **FORCED COAG**.



Ножным выключателем активируется водная струя с настройками давления, рекомендуемыми для данного применения.



ООО «Эрбэ Электромедицин»
Почтовый адрес:
119334, г. Москва,
5-й Донской проезд, д. 15, стр. 24
Телефон +7 (495) 287-95-39
Факс +7 (499) 922-19-25
info@erbe-russia.com
erbe-russia.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Тюбинген
Германия
Телефон +49 7071 7550
Факс +49 7071 755179
info@erbe-med.com
erbe-med.com